


## Spycra Protect pour l'Épidermolyse Bulleuse

### Protection de la plaie

Les patients EB sont confrontés à la difficulté majeure de protéger les zones cutanées fragiles. La formation de cloques se produit principalement sur les mains et les pieds, mais peut se produire sur n'importe quelle partie du corps lorsqu'elle est exposée au frottement. Une bonne protection peut réduire le nombre de cloques et la gravité des lésions de la peau. Les pansements en silicone souple sont bien tolérés et peuvent généralement être retirés sans douleur ni dommage supplémentaire pour la peau fragile.

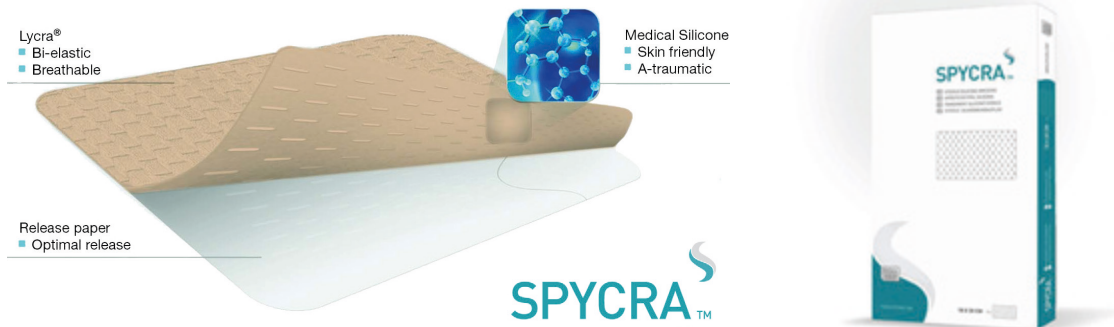

### Spycra Protect

**Spycra Protect** se compose d'une couche de silicone souple sur laquelle est appliquée une fine couche de fibres Lycra® lisses. Le pansement est de couleur chair, il est soyeux et possède des propriétés auto-adhésives. Le pansement est bi-élastique (extensible en largeur et en longueur) et repositionnable avec des coins arrondis pour une meilleure fixation. Il réduit l'effet négatif du frottement sur la peau fragile et les lésions cutanées supplémentaires telles que la formation de cloques. La structure à larges pores est perméable à l'air et permet l'évaporation de la transpiration. Le retrait ou le repositionnement est indolore et réduit à peine la force d'adhérence. **Spycra Protect** peut être appliqué directement tant sur la peau intacte que sur de petites plaies et cloques.



**Spycra Protect** ne doit pas être remplacé tous les jours. Le pansement peut rester appliqué durant plusieurs jours pour donner à la plaie le temps de guérir ou pour fournir une protection continue à la peau fragile. Cependant, vous veillerez à remplacer à temps tout pansement fortement souillé.

### Étude clinique auprès de patients EB

Les résultats de l'étude clinique sur l'utilisation de **Spycra Protect** pour l'Épidermolyse Bulleuse montrent que le pansement est bien accepté et qu'il est reconnu comme confortable. Une réduction des lésions est un critère déterminant pour les patients présentant des formes tant sévères que bénignes d'EB. La plupart des patients ont estimé que **Spycra Protect** fournit une excellente protection pour leur peau fragile, certains prétendant même que les dommages cutanés par frottement ont été complètement éliminés. Le pansement protecteur en silicone s'est avéré très efficace pour ces groupes de patients EB. Les études suggèrent que **Spycra Protect** est une plus-value pour tous les patients EB, avec une pertinence particulière pour les patients souffrant d'Épidermolyse Bulleuse Simplex.

Clapham, J., Bloor, C. (2014). *Use of Spycra Protect in Epidermolysis Bullosa (EB)*. Guy's & St Thomas' NHS Trust.

Denyer, J. (2015). *Use of a bi-stretch silicone dressing (Spycra Protect) to maintain skin integrity in children with epidermolysis bullosa*. Great Ormond Street Hospital and DEBRA UK.

Denyer, J., Pillay, E., & Clapham, J. (2017). *Best practice guidelines for skin and wound care in epidermolysis bullosa. An International Consensus*. Wounds International.

## Spycra Protect pour l'Épidermolyse Bulleuse

### Usages

Spycra Protect peut être utilisé de manière préventive sur la peau à risque comme aide à la peau fragile, mais aussi pour réduire tout risque de blessures par frottement. Spycra Protect est applicable aux emplacements suivants :



- Sur des petites cloques
- Sur des parties guéries de la peau comme protection
- Sur l'arête de votre nez ou autour de vos oreilles pour éviter le frottement de vos lunettes
- Sous les soutiens-gorge (sous les bretelles et sous les armatures)
- Sous des sous-vêtements moulants
- Sous la ceinture
- Sous le bracelet de la montre
- Entre les doigts pour prévenir la formation de toison dans le cas de l'EB dystrophique
- Autour des doigts pour tenir des crayons
- Sous les bagues
- Sur les fesses
- Sous les plis de la peau
- Aux endroits de friction comme les pieds chez EB Simplex
- Autour des talons ou à la base du pied
- Spycra Protect peut également être collé sur des objets comme les lunettes et les crayons
- Sous et autour des colliers

### Informations de commande

Spycra Protect est disponible en pharmacie dans différentes tailles et sur rouleau. Le pansement peut être coupé à la taille souhaitée. Spycra Protect est classé parmi les pansements actifs remboursables en cas d'usage chronique.

Code de commande	Code CNK	Emballage	Dimensions
5101274	2970-762	1 pièce: rouleau	5 cm x 150 cm
5101278	2970-754	5 pièces	18 cm x 30 cm
5105279	2970-747	5 pièces	10 cm x 18 cm
5101280	2970-721	10 pièces	5 cm x 7.5 cm
5101281	2970-739	10 pièces	5 cm x 10 cm

 N.V. International Medical Products S.A.

Waverssesteenweg 1110/7 Chaussée de Wavre  
OUDERGEM 1160 AUDERGHEM - BELGIUM T:  
+32 (0)2 660 50 75 - F: +32 (0)2 660 20 98  
[www.intermed.be](http://www.intermed.be) - [info@intermed.be](mailto:info@intermed.be)