

## SanoSkin® Cleanser

### Wondverzorging

**SanoSkin® Cleanser** is een wateroplossing van chloorhexidine, glycerol en polysorbaat om wondentereinigen. De **SanoSkin® Cleanser** verwijdert debris en micro-organismen, spoelt en reinigt.

Moderne wondbehandeling raadt een reinigingsmiddel aan op basis van fysiologisch water gemengd met milde detergenten (niet-cytotoxisch). Hierdoor worden vetten en eiwitten aanwezig in het wondvocht sneller opgelost en worden ze efficiënt verwijderd.

Polysorbaat lost eiwitten en vetten snel op en de chloorhexidine zorgt dat er geen microorganismen kunnen ontwikkelen in de oplossing bij een eventuele contaminatie.



### SanoSkin® Cleanser

- De **SanoSkin® Cleanser** bevat glycerine wat ervoor zorgt dat de oplossing zacht is en waardoor ook de omliggende huid bespaard wordt.
- De **SanoSkin® Cleanser** bevat polysorbaat 20 - een detergent en emulgator - die vetten en proteïnen oplost.
- Het **SanoSkin® Cleanser** sproeikopsysteem maakt het eenvoudig om de kracht van de straal te regelen. De aanpasbare stroom maakt zowel het reinigen van eenvoudige als moeilijke wonden mogelijk.
- De **SanoSkin® Cleanser** bevat 250 ml oplossing.
- De **SanoSkin® Cleanser** bevat geen prikkelende stoffen (zuren), wat het comfort voor de patiënt verhoogt.
- De **SanoSkin® Cleanser** is beschermd voor verschillende jaren tegen microbiologische contaminatie omdat chloorhexidine in beperkte mate werd toegevoegd.

### Bestelinformatie

De **SanoSkin® Cleanser** is verkrijgbaar in een flacon van 250 ml.


Bestelcode	CNK Code	Verpakking	Inhoud
8394012	2705-788	6 x 250 ml/doos	250 cc.

## SanoSkin® Cleanser

### Gebruiksaanwijzing

- Zet sproeikop in « Spray » (irrigatie) of « Stream » stand (reiniging).
- Zet na gebruik steeds weer in « Stop » stand.

### Toepassingen

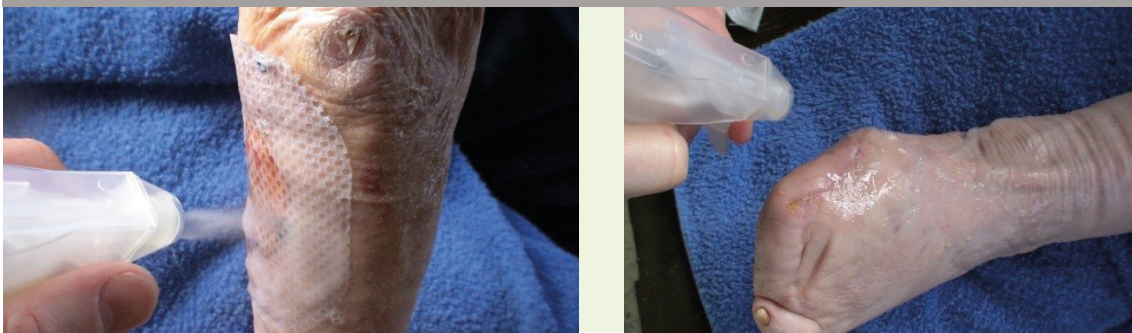

### Ingrediënten

Aqua, Polysorbaat 20, Glycerol, Sorbitol, Chloorhexidine digluconaat, Sodium hydroxide.

### Indicaties

Verwijdert debris en micro-organismen, reinigt en spoelt.

### Contra-indicaties

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties gekend.

### Voorzorgsmaatregelen

Niet als antisepticum gebruiken.



### INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS

Waversesteeweg 1110 box 7  
1160 Oudergem - België  
Tel: +32 (0)2 660 50 75 - Fax: +32 (0)2 660 20 98  
[www.intermed.be](http://www.intermed.be) – [info@intermed.be](mailto:info@intermed.be)

