

GEBRUIKSAANWIJZING



■ Parasietsuspensies in formaldehyde

BEOOGD GEBRUIK

Parasietsuspensies van Microbiologics ondersteunen kwaliteitsbewakingsprogramma's door te dienen als materiaal voor kwaliteitstests met specifieke parasietpopulaties met bekende eigenschappen. Deze monsters ondersteunen formele kwaliteitsbewakingsprogramma's door te dienen als materiaal voor kwaliteitstests om de bekwaamheid van het personeel bij het uitvoeren van procedures en de juiste interpretatie van microscopische testresultaten te documenteren. Parasietsuspensies van Microbiologics kunnen ook worden gebruikt voor leerdoeleinden in een educatieve omgeving.

SAMENVATTING EN VERKLARING

Deze soorten monsters worden gewoonlijk gebruikt voor leerdoeleinden en voor het testen van de bekwaamheid van personeel in het identificeren en testen op bepaalde organismen.

PRINCIPES

Dit product is bedoeld voor gebruik bij een of meer van de volgende technieken, afhankelijk van de eigenschappen van het organisme:

- Immunoassay ter detectie van antigenen
- Microscopie met natieve preparaten ter observatie van morfologische eigenschappen van het organisme
- Zuurvaste kleuring ter observatie van kleuring en morfologische eigenschappen van het organisme

SAMENSTELLING

- Parasieten (zie de catalogus of de webpagina www.microbiologics.com voor specifieke details van elke parasiet)
- Fecaal materiaal
- Formaldehydeoplossing, neutraal gebufferd, 10%

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

GEVAARLIJK. Giftig bij inslikken. Giftig bij inademen. Potentieel kankerverwekkend.

- Uitsluitend voor in-vitro diagnostiek.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- Raadpleeg het veiligheidsblad op de webpagina van Microbiologics, www.microbiologics.com voor volledige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.
- Pas hanteren als alle veiligheidsmaatregelen gelezen en begrepen zijn.
- Gebruik de vereiste persoonlijke beschermuitrusting. Gebruik beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
- **INDIEN INGESLIKT:** Raadpleeg onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts. Spoel de mond.
- Indien blootgesteld of bezorgd daarover: Medisch advies/consult inwinnen.
- Veroorzaakt huidirritatie. Na hanteren de handen grondig wassen.
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Kan schade aan organen veroorzaken.
- Verontreinigde werkkleding mag de werkplaats niet verlaten.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **INDIEN IN DE OGEN:** Gedurende een aantal minuten voorzichtig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Blijven spoelen. Als oogirritatie blijft bestaan: Medisch advies/consult inwinnen.
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Vermijd inademen van stof/damp/gas/mist/wasem/spray. Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Hoewel deze suspensies gefixeerde, niet-levensvatbare organismen bevatten, dienen ze voor de veiligheid van het volledige personeel te worden behandeld alsof ze biologisch gevaarlijk materiaal bevatten.
- Het microbiologisch laboratorium moet uitgerust zijn voor en beschikken over de benodigde faciliteiten voor het ontvangen, verwerken, onderhouden, opslaan en afvoeren van biologisch gevaarlijk materiaal.
- Alle Microbiologics-producten en -verpakkingen zijn latexvrij.

PARASITE
SUSPENSIONS

INSTRUCTIES VOOR HET MENGEN

Het monster moet gemengd worden door krachtig schudden met de hand of door te vortexen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

De parasietsuspensies dienen te worden bewaard bij 15 °C - 30 °C.

Bewaren op een goed geventileerde plek. Laat de verpakking goed gesloten. Achter slot bewaren. De vervaldatum van deze producten is twee jaar na de productiedatum. De parasietsuspensies mogen niet worden gebruikt als:

- Ze incorrect bewaard werden
- Er tekenen zijn van blootstelling aan excessieve hitte of schade aan de verpakking
- De vervaldatum is verstreken

Houd u aan de regionale en plaatselijke regelgeving voor afvoer van dit product.

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze monsters kunnen gebruikt worden als nat preparaat, voor antigenetectie en voor zuurvaste kleuring.

Voor alle procedures geldt:

1. Meng de suspensie grondig door krachtig schudden of vortexen.
2. Laat de suspensie 5 à 10 minuten voor gebruik in testprocedures tot rust komen.
3. Breng voorzichtig een pipet in tot op de bodem van de flacon en neem een enkele druppel om te testen. Volg standaard laboratoriumwerkwijzen, kleuringsinstructies, of de instructies van de kitfabrikant voor testprocedures.

BENODIGDE MAAR NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN EN APPARATUUR

- Timer
- Transferpitetten
- Ander materialen gespecificeerd in de standaard laboratoriumwerkwijze of de gebruikte kit

KWALITEITSCONTROLE

Raadpleeg het laboratorium SOP of de instructies van de fabrikant voor kwaliteitscontrolebenodigdheden.

BEPERKINGEN

Dit product is mogelijk niet geschikt voor gebruik met alle kits en procedures. Zie de instructies van de fabrikant van de kit voor monstergegevens. Alleen voor professioneel gebruik.

MICROBIOLOGISCHE STATUS

Dit monster bevat gefixeerde, niet-levensvatbare organismen.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Batchcode (partij)



Gezondheid Gevaar



Catalogusnummer



Let op, raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Raadpleeg de gebruiksinstructies



In-vitrodiagnostisch medisch hulpmiddel



Producent



Temperatuurlimieten



Te gebruiken vóór



Acute toxiciteit



CE-markering



Geautoriseerd vertegenwoordiger
in de Europese Gemeenschap

PRODUCTGARANTIE

Er wordt gegarandeerd dat deze producten voldoen aan de specificaties en de werking als vermeld en geïllustreerd in productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. De expliciete of impliciete garantie wordt beperkt als:

1. de in het laboratorium gebruikte procedures in strijd zijn met de vermelde en geïllustreerde aanwijzingen en instructies;
2. de producten gebruikt worden voor andere toepassingen dan de toepassingen waarvoor de producten zijn bedoeld en die in de productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur zijn vermeld.

REFERENTIES

1. Ash, L.R., and Orihel, T.C. Atlas of Human Parasitology- 2nd Ed. (American Society of Clinical Pathologists, 1984)
2. Garcia, L.S. A Practical Guide to Diagnostic Parasitology (ASM Press, 2009)

WEBSITE

Bezoek onze website voor actuele technische informatie en de beschikbaarheid van producten.
www.microbiologics.com

CONTACTGEGEVENS



Microbiologics, Inc.

200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 Verenigde Staten
www.microbiologics.com

Klantenservice

Tel. 1.320.253.1640
US gratisnummer. 1.800.599.2847
E-mail: info@microbiologics.com

Technische ondersteuning

Tel. 1.320.229.7045
US gratisnummer. 1.866.286.6691
E-mail: techsupport@microbiologics.com



MediMark® Europe


11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, Frankrijk
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82
Correo electrónico:
E-mail: info@medimark-europe.com

PARASITE SUSPENSIONS

GEÏLLUSTREERDE INSTRUCTIES


1

Meng de suspensie grondig door krachtig schudden of vortexen.

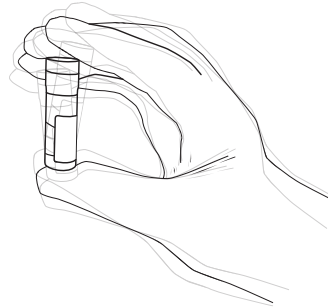

2

Laat de suspensie 5 à 10 minuten voor gebruik in testprocedures tot rust komen.

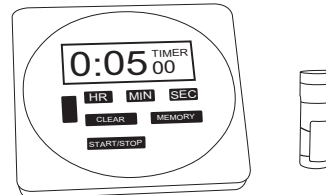

3

Breng voorzichtig een pipet in tot op de bodem van de flacon en neem een enkele druppel om te testen. Volg standaard laboratoriumwerkwijzen, kleuringsinstructies, of de instructies van de kitfabrikant voor testprocedures.

