



Tétines Nipplie

Pour une tétée plus naturelle



LIFE STARTS WITH US

Véritable instant de complicité, qui se renouvelle 6 à 8 fois par jour, le moment du repas est clé pour le bon développement des petits patients sensibles que sont les nouveau-nés.

Préserver au mieux chacun de ces instants privilégiés, même lorsque l'allaitement au sein n'est pas possible, est une priorité pour les parents et le personnel hospitalier, tout en s'assurant de dispenser du lait, de façon hygiénique et sécurisée.



Faciliter la prise en bouche et le mouvement naturel de la langue lors d'un repas au biberon avec les **tétines Nipple Beldico**

Les tétines à usage unique Beldico sont des dispositifs médicaux prévus pour l'administration orale de lait maternel, de lait reconstitué ou autre type d'alimentation liquide, avec ou sans adjonction de médicaments ou nutriments, à des prématurés ou des nourrissons vulnérables séjournant en milieu hospitalier et nécessitant une alimentation adaptée.

Fabriquées en salle propre, puis stérilisées par ETO ou traitées par rayon Gamma, les tétines à usage unique Beldico limitent le risque de développement de germes externes et préservent l'équilibre du lait maternel.

Beldico a conçu la tétine Nipple, une tétine proche de la forme du sein maternel, pour une tétée facilitée et une transition plus douce entre allaitement au sein et biberon, qui répond aux besoins des services de **néonatalogie**, de **maternité** et de **pédiatrie**.

Adaptée aux pratiques hospitalières

- **PRATIQUE** : La tétine Nipple déjà stérilisée ou bactériologiquement propre, en pas de vis universel, est prête à l'emploi.
- **HYGIÉNIQUE** : Les cache-tétines garantissent une protection physique et aseptique de la tétine jusqu'à l'administration à l'enfant.
- **ANTI-FUITE** : La souplesse de la tétine, son indépendance vis-à-vis de l'anneau, et son large retour sous l'anneau lui permettent d'assurer l'étanchéité lors de la fixation sur le biberon.



2 formats reconnaissables à la couleur de leur anneau

Conçue pour faciliter une tétée plus naturelle

La forme et la matière de la tétine **Nipple** ont été soigneusement sélectionnées par les équipes de R&D Beldico en s'appuyant sur l'avis d'experts hospitaliers. Ainsi, la tétine **Nipple** est parfaitement adaptée à la physiologie de la tétée.


Le juste équilibre entre Souplesse & Dureté

La tétine Nipple est **souple et s'allonge en bouche** durant la tétée : elle se positionne correctement dans la cavité buccale, facilite le mouvement péristaltique de la langue et le transfert du lait vers l'oesophage.

La dureté de la tétine Nipple permet une tétée confortable et sans interruption.

Un design unique

La tétine Nipple combine une **base large** et une **forme anatomique** pour aider l'enfant à reproduire le mouvement naturel de succion lors de l'allaitement au sein, et réduire ainsi le risque de confusion sein-tétine.

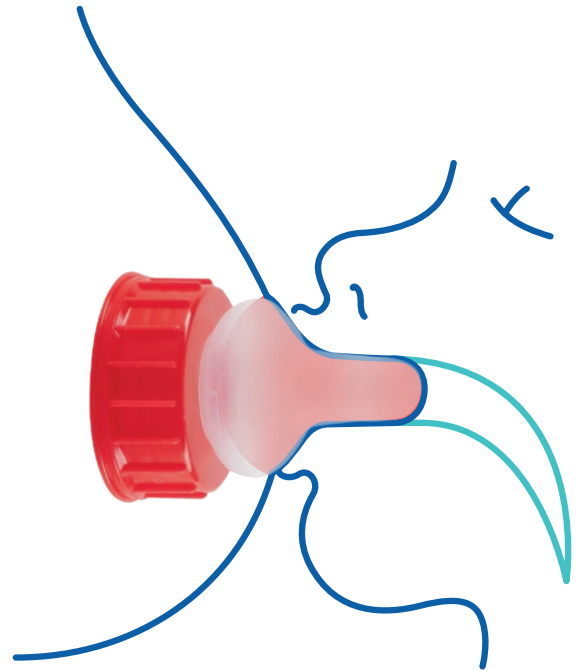

Débit de tétée sécurisé

par des microperçages avec renforts anti-déchirure

Matière **douce non collante, sans goût & sans odeur** proche de la sensation du sein

Tétine à bout rond extra-souple qui **s'adapte à la plupart des bouches des bébés**, y compris ceux qui ont des difficultés à téter

3 niveaux de débits adaptés pour laisser passer la bonne quantité de lait en fonction de la demande de l'enfant

Base large imitant le sein pour un meilleur appui de l'enfant et **encourage l'ouverture de la bouche de bébé***

Pour la tétine 3V

- Débit lent
- Débit moyen
- Débit rapide




0% BPA, BPS, Phtalates, Latex

*Comparativement à une tétine classique à base étroite

Caractéristiques standards

Dénomination	Tétines Nipple à usage unique
Matières	Tétine : Elastomère thermoplastique (TPE) Anneau : Polyéthylène Haute Densité (HDPE) Cache-tétine : Polypropylène (PP) Garanti sans latex, sans phtalates, sans BPA, sans BPS Matières recyclables, à éliminer selon les procédures de gestion des déchets hospitaliers applicables
Type de traitement	Stérilisation NAS 10 ⁻⁶ par ETO ou Désinfection NAS 10 ⁻² par irradiation Gamma
Directive 93/42/CEE	Dispositif Médical IIa

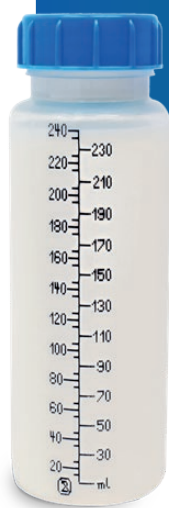

240mL



130mL



80mL



50mL



40mL pour Colostrum

Le biberon à colostrum possède un culot arrondi pour permettre aux soignants de récupérer jusqu'à la dernière goutte du précieux 1^{er} lait maternel.

Les tétines Nipple TV et 3V sont adaptables sur la gamme complète de biberons Beldico à pas de vis universel, prêts à l'emploi et à usage unique.

Beldico développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés et se focalise tout spécialement sur les besoins spécifiques des nouveau-nés et prématurés.

Biberons – téterelles – tétines – sucettes
Expression et traitement du lait maternel
Réchauffement du lait maternel ou maternisé

Fabricant

BELDICO
Rue André Feher 3
BE-6900
Marche-en-Famenne
BELGIQUE
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Distributeurs

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.
Place Marcel Broodthaers 8/5
BE-1060 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

BELDICO B.V.
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
PAYS-BAS
Tel : 0031 (0) 765 244 663
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S
ZA Node Park Touraine
Rue Gilles de Genes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr